

Mode d'emploi simplifié baignoire bébé MobyTub®



Instructions d'utilisation de la baignoire MobyTub®

Utilisez la baignoire exclusivement aux fins prévues et conformément à l'usage auquel elle est destinée.

Veillez à ce que les freins de la baignoire soient toujours verrouillés pendant l'utilisation et de ne laisser jamais le bébé sans surveillance dans la baignoire.

Freinage de la baignoire MobyTub®

Les roues peuvent être verrouillées en utilisant la pédale de verrouillage sur les roues, comme indiqué sur l'image 1.



1.

Réglage de la hauteur et de l'inclinaison

La hauteur de la baignoire peut être facilement réglée à l'aide de la pédale de commande, comme illustré sur l'image 2.

En maintenant le pied sur la pédale, vous pouvez régler la hauteur jusqu'à la position souhaitée.



2.

Remplissage et vidange de la baignoire MobyTub®

La baignoire peut être remplie à l'aide d'un robinet ou d'un pommeau de douche. Après le bain, l'eau peut être vidée. Déverrouillez d'abord la baignoire en tirant doucement sur la goupille de verrouillage. Ensuite, inclinez la baignoire à l'aide de la poignée pour la vider. Voir les images 3 et 4. Après la vidange, remettez la baignoire en place en veillant à ce que la goupille se remette en place dans la fente.



3.

Chargement de la batterie

Pour charger la batterie, il faut la retirer de la station d'accueil et la brancher sur le chargeur correspondant. Pendant la charge, un voyant rouge est visible. Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les voyants verts de la batterie s'allument. Réinsérez ensuite la batterie comme indiqué dans l'image ci-dessous.



4.



Ne pas déplacer la baignoire si un bébé s'y trouve, ou si elle est en charge.